



# Description des diploscopes et de leurs fonctionnalités



## Types de diplosopes :

- Il existe actuellement 8 types de diplosopes :

- Diploscope « Préparatoire » (PR)
- Diploscope « Vision de Loin » (VL)
- Diploscope « Vision Intermédiaire » (VI)
- Diploscope « Grand Effort » (GE)
- Diploscope « Haute Tension » (HT)
- Diploscope vision de loin en fonction périmétroscopique (en développement)
- Diploscope vision Intermédiaire en fonction périmétroscopique (en développement)
- Diploscope vision de près en fonction périmétroscopique (en développement)



➤ Les nouvelles versions perimétroscopique sont actuellement à l'étude et permettent de travailler la fonction visuelle dans tout le périmètre de vision (en haut ,en bas, à gauche ,à droite, en oblique, de manière statique et en mouvement).

C'est un outil extrêmement puissant dans la régulation de certains troubles comme les vertiges ou les déséquilibres mais également pour les sportifs.


La fonction perimétroscopique version CeREN® constitue un véritable 4<sup>ème</sup> cycle. Les fonctions de ces différents diplosopes sont décrites dans la pages suivante.



## Diploscope « Préparatoire »

→ Vie émotionnelle et affective

- Le diploscope « Préparatoire » permet d'agir sur :
  - Les inhibitions (coupures d'information entre l'œil et le cortex) en diminuant la fréquence.
  - Effet de déblocage des traumatismes émotionnels et affectifs grâce à sa combinaison d'images en mouvement.
  - Aide à la suppression de certains blocages dans le passage des tests de bases aux tests complexes.
- Des séquences préprogrammées sont incluses dans un micro-ordinateur qui pilote le diploscope PR (et VL) (brevet).

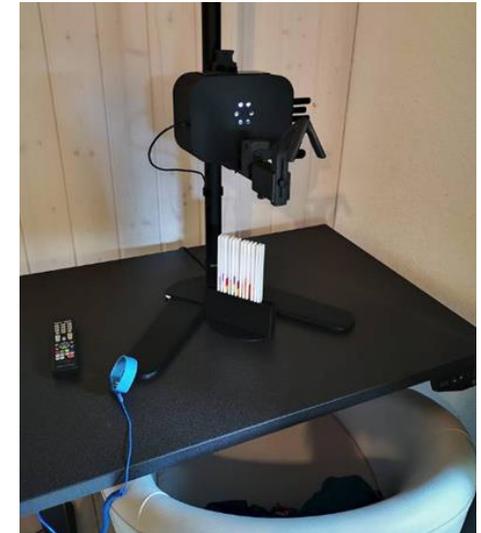



## Diploscope « Vision de Loin » : repos

### → le système sensori-moteur

- Le diploscope « Vision de Loin » permet de réguler, en 3 cycles, les fonction suivantes :
  - Tonus musculaire
  - Sensibilité sensorielle



	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3
Spectrales	$\begin{matrix} 3 & 4 \\ 9 & 10 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 2/4/3 \\ 3/4/2 \end{matrix}$	$2/4/2$
Couleurs	$\begin{matrix} 3 & 4 \\ 9 & 10 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 2/4/3 \\ 3/4/2 \end{matrix}$	$2/4/2$
Lettres	$\begin{matrix} 3 & 4 \\ 9 & 10 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 2/4/3 \\ 3/4/2 \end{matrix}$	$2/4/2$

#### 3 Barrettes texte avec filtres couleurs (barrette blanc transparent)

Réf : VL-10	$\begin{matrix} Q & U & I \end{matrix}$
Réf : VL-11	$\begin{matrix} D & O & G & E \end{matrix}$
Réf : VL-12	$\begin{matrix} L & I & T \end{matrix}$

#### 3 Barrettes couleurs « terre » (barrette blanc opaque)

Réf : VL-20	$\begin{matrix} \text{Green} & \text{Yellow} & \text{Red} \end{matrix}$
Réf : VL-21	$\begin{matrix} \text{Red} & \text{Green} & \text{Yellow} & \text{Blue} \end{matrix}$
Réf : VL-22	$\begin{matrix} \text{Blue} & \text{Green} & \text{Red} \end{matrix}$

#### 3 Barrettes couleurs « fleurs » (barrette blanc opaque)

Réf : VL-30	$\begin{matrix} \text{Green} & \text{Yellow} & \text{Red} \end{matrix}$
Réf : VL-31	$\begin{matrix} \text{Red} & \text{Green} & \text{Yellow} & \text{Blue} \end{matrix}$
Réf : VL-32	$\begin{matrix} \text{Yellow} & \text{Green} & \text{Red} \end{matrix}$






## Diploscope « Vision Intermédiaire » : effort moyen

→ Système neuro-végétatif

→ Equilibre sympathique, parasympathique

■ Le diploscope « vision Intermédiaire » permet de régler, en 3 cycles, les fonctions suivantes :

- Digestion, circulation
- Rythme cardiaque
- Fonction hormonale et endocrinienne...

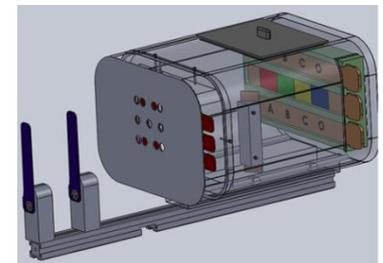

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3
<b>Spectrales</b>	$\frac{4}{10}$	$\frac{3/4/4}{4/4/3}$	$\frac{4/4/4}{4/4/4}$
<b>Couleurs</b>	$\frac{4}{10}$	$\frac{3/4/4}{4/4/3}$	$\frac{4/4/4}{4/4/4}$
<b>Lettres</b>	$\frac{4}{10}$	$\frac{3/4/4}{4/4/3}$	$\frac{4/4/4}{4/4/4}$
<b>Lettres oranges</b>	$\frac{4}{10}$	$\frac{3/4/4}{4/4/3}$	$\frac{4/4/4}{4/4/4}$

<b>3 Barrettes lettres (barrette blanc difusant 40%)</b>	
Réf : VI-10	A O B P C L D
Réf : VI-11	M H Y Z
Réf : VI-12	1 1 2 1 1 3 1 1 4
<b>3 Barrettes lettres sur orange (barrette blanc opaque) - calé sur barre</b>	
Réf : VI-20	A O B P C L D
Réf : VI-21	M H Y Z
Réf : VI-22	1 1 2 1 1 3 1 1 4
<b>3 Barrettes couleurs « terre » (barrette blanc opaque)</b>	
Réf : VI-30	[Red][Green][Yellow][Blue]
Réf : VI-31	[Red][Yellow][Green][Blue]
Réf : VI-32	[Blue][Yellow][Green][Red]
<b>3 Barrettes couleurs (fleurs) (barrette blanc opaque)</b>	
Réf : VI-40	[Red][Green][Yellow][Blue]
Réf : VI-41	[Red][Yellow][Green][Blue]
Réf : VI-42	[Blue][Yellow][Green][Red]



## Diploscope « Grand Effort » : Vision de près








→ Vie psychique et cognitive avec action sur la :




- Zone hypothalamique
- Formation réticulée


■ Le diploscope « Grand effort » permet de réguler, en 3 cycles, les fonctions suivantes :

- Emotionnel, affectif, rapport aux proches,
- Concentration, sommeil, mémorisation, attention...

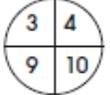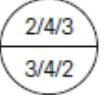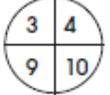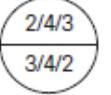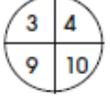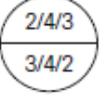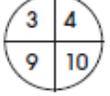

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3
Couleurs			
Lettres			
Lettres oranges			
Petites lettres			

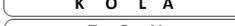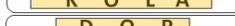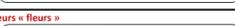Barrettes GE 3 lettres 6 mm	
Ref : GE10	
Ref : GE11	
Ref : GE12	
Barrettes GE 3 lettres 3,5 mm	
Ref : GE20	
Ref : GE21	
Ref : GE22	
Barrettes lettres sur orange (barrette blanc opaque)	
Ref : GE30	
Ref : GE31	
Ref : GE32	
Barrettes couleurs « terre »	
Ref : GE40	
Ref : GE41	
Ref : GE42	
Barrettes couleurs « fleurs »	
Ref : GE50	
Ref : GE51	
Ref : GE52	

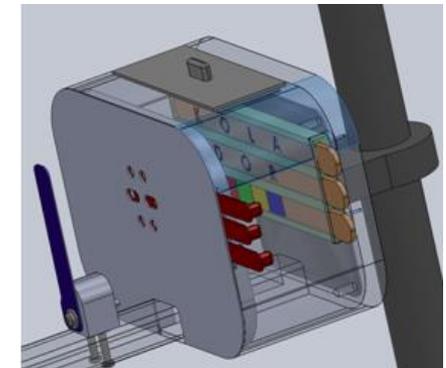





## Diploscope « Haute Tension » : vision de près

→ **vie mentale**

- Le diploscope « Haute Tension » permet de réguler, en 3 cycles, les fonctions suivantes :
  - Comportement intellect, mémoire, volonté
  - Clarté d'esprit, discernement

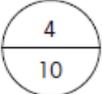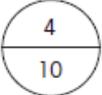

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3
Chiffres			
Chiffres			
Lettres			
Lettres			

barrette numéro 1 - lettres de 4 mm  
(1 barrette par HT)


```

1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1
5 3 1 6 7 2 4
    
```

barrette numéro 2 - lettres et symboles de 4 mm  
(1 barrette par HT)

```

K F O U L X A
T M O I B R Y
♥ ☺ ♠ + ♦ ✨ ♣
    
```

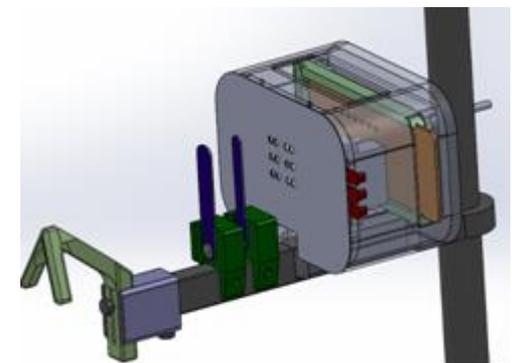



## Les tables »assis debout »

▪ Les tables « assis-debout » électriques et le système de « pliage » des diplosopes VI et VL (brevet), permettent l'utilisation des diplosopes pour une large population à la fois en position assise et en position debout :

- enfants en position assise dès 7 ans,
- adultes de 2 m en position debout.



Diplosopes VI et VL sur table E5 (débattement de 62 à 129 cm)

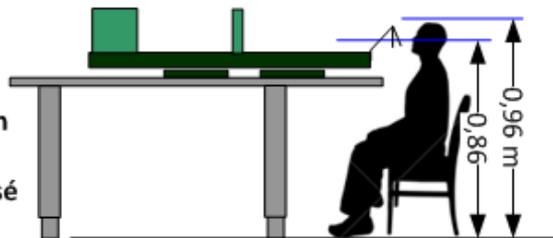


Table en position basse et diploscope abaissé

Diplosopes PR, GE et HT sur table E1 (débattement de 71 à 121 cm)

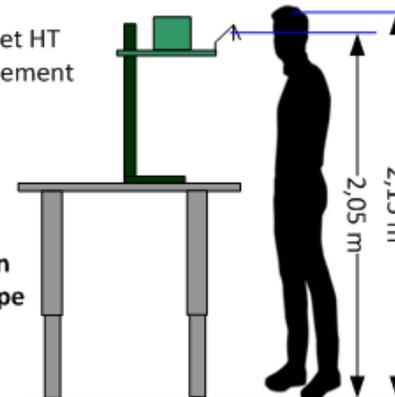


Table en position haute et diploscope en haut du mat





## Exemple de Cabinets CEREN® actuellement installés





## PASSEPORT De Mr Frank GIRAUDEAUX

- Diplômé de psychologie l'université de Reims
  - Neuro Pédagogue et formateur certifié de l'institut Quertant
  - Créateur des centres CeREN® et du Training Neuro Sensorie® I
  - Santé Environnementale et Immunologie Nutritionnelle
  - Jeûne sec, jeûne hydrique et FMD
  - Praticien Quantum Touch et Neshealth certifié
  - Coach sportif
- Tél (+33) 06 81 91 78 35
  - Email : [santeceren@gmail.com](mailto:santeceren@gmail.com)
  - Site internet : <https://www.training-neuro-sensoriel.fr>



## Fabriquant des Diploscoptes



- Société NEODOO – Gérant Michel SIMONITTI
- Descriptions détaillées des diploscoptes : <http://diploscoptes.neodoo.fr>



Le Site Internet « [ceren.info](http://ceren.info) » regroupe tout les cabinets CEREN® en France et en Suisse.

### Site portail des praticiens du Training Neuro Sensoriel

Le Training Neuro Sensoriel ou TNS® est une méthode de Neurophysiologie appliquée spécialisée dans le dépistage et la suppression des troubles nerveux fonctionnels.



Fort de sa longue expérience et d'une pratique quotidienne sur des milliers de clients, Frank Giraudeau ancien élève et assistant de Marguerite Quertant a élaboré une nouvelle technique : le Training Neuro Sensoriel ou TNS®.

Le TNS® est une évolution moderne et optimisée de la Culture Psycho Sensorielle mise au point par le chercheur Français Georges Quertant après plus de 30 ans de recherches et d'expérimentations. Le TNS® tient compte de la dégradation des conditions environnementales que doit subir l'homme moderne et apporte des résultats encore plus puissants et rapides.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site CEREN <https://www.training-neuro-sensoriel.fr/>

Trouvez les praticiens :

